

Инструкция по установке

Программного обеспечения
производства ООО «НПФ «Амалтея»
«Нейрокурс»

Оглавление

1. Установка ПО
2. Настройка ПК
3. Удаление ПО

1. Установка ПО

Перед установкой программы убедитесь, что на жестком диске свободно не менее 900 Мб. Вставьте установочный компакт-диск «Нейрокурс» в CD-ROM. Если на компьютере включен автозапуск компакт-дисков, то через несколько секунд запустится программа-установщик; если же этого не произошло, откройте CD-ROM с помощью «Проводника» или иконки «Мой компьютер», и вручную запустите программу “*Setup.exe*”.

Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением, укажите, какому пользователю и какой организации принадлежит право на использование этого экземпляра системы. Далее, укажите директорию, в которую следует установить программу «Нейрокурс». По умолчанию программа ставится в директорию “*C:/NeuroCourse*”, и, чаще всего, менять этот путь нет необходимости.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется ставить программу в директорию “*Program files*”, так как под операционными системами Windows Vista и Windows 7 это может привести к нестабильной работе программы!

После того, как программа-установщик скопирует все необходимые файлы в указанную директорию, она предложит установить две

дополнительные программы – драйвер виртуального COM-порта, и проигрыватель Adobe Flash.

Драйвер виртуального COM-порта необходим для подключения прибора «УСО-01». Если драйвер не установить, то при попытке проведения сеанса программа не сможет получать данные с прибора, и сеанс запустится в режиме «эмуляции» (см. § **Ошибка! Источник ссылки не найден.**). Если вы забыли установить этот драйвер при установке программы, вы можете установить его вручную, запустив программу *CP210xVCPInstaller.exe* с установочного диска (она находится в папке *Redist*).

Проигрыватель Adobe Flash (*Adobe Flash Player ActiveX*) необходим для тренировок в режиме «Игра» (§ **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, § **Ошибка! Источник ссылки не найден.** и § **Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

После завершения установки ярлыки для запуска программы «Нейрокурс» появятся на рабочем столе Windows, и в главном меню (*Пуск/Программы/Нейрокурс*).

2. Настройка компьютера

Перед запуском программы «Нейрокурс» может понадобиться настройка компьютера.

Программа рассчитана на разрешение экрана не менее чем 1024x768 точек, при цветовой палитре *High Color (16 bit)* или *True Color (24/32 bit)*. Убедитесь, что экран настроен соответствующим образом (*Пуск/Настройка/Панель управления, Экран*, вкладка «*Параметры*»).

Далее, необходимо отключить скринсейверы и запретить отключение монитора. При проведении сеанса с компьютером обычно не совершают никаких действий (не нажимают клавиши, не трогают мышку и т.д.); от этого скринсейвер может сработать и помешать проведению сеанса. Откройте панель управления Windows (*Пуск/Настройка/Панель управления*), запустите приложение «*Экран*». На вкладке «*Заставка*» отключите заставку (выберите в списке пункт «*Нет*»). Далее, нажмите кнопку «*Питание*»; в окне управления питанием установите «*отключение дисплея*», «*отключение дисков*» и «*ждущий режим*» в значение «*никогда*».

Настройте громкость динамиков. Для этого запустите регулятор громкости (*Пуск/Программы/Стандартные/Развлечения/Громкость*), и отрегулируйте «Общую громкость» и громкость канала «Звук».

Для работы программы «Нейрокурс» к компьютеру должен быть подключен второй монитор, который используется для отображения обратной связи в тренировочных сеансах (см. Глава 6). Для настройки второго монитора откройте окно настроек (*Пуск/Настройка/Панель управления, Экран*) и перейдите на вкладку «*Параметры*». Выберите второй монитор (щёлкните на прямоугольнике с цифрой «2»), и включите переключатель «*Расширить рабочий стол на этот монитор*».

Разрешение второго монитора рекомендуем устанавливать как можно *меньше* (например, 800x600), в противном случае программа может «тормозить», особенно в режиме «Игра» (§ **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, § **Ошибка! Источник ссылки не найден.** и § **Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

§ 1.1. Удаление программы

Для удаления программы «Нейрокурс» выберите в Главном меню пункт *Пуск/Программы/Нейрокурс/Удаление программы*.

ВНИМАНИЕ! При удалении программы уничтожаются только исполняемые файлы и ресурсы мультимедиа. Картоотека и результаты сеансов остаются на жестком диске. Их можно потом удалить вручную.